

# 「家庭用温熱・電位治療器（敷布団）」のご使用について の重要なお知らせ（注意喚起）

株式会社ブリヂストンが販売致しました「家庭用温熱・電位治療器（敷布団）」の下記対象製品に関してやけどの恐れがありますので、ご使用について下記の警告表示及びその他の注意事項をご確認頂き、適切にご使用をお願い致します。製品本体内部の発熱体にシワ（ずれ）が生じてしまうと部分的に高温になり、やけどを負う恐れがあります。製品に変色がある、通電時に臭いがする、熱い、部位により温度ムラがあるなどの異常がみられる場合は、直ちにご使用を中止してください。

ご不明な点がございましたら下記問い合わせ窓口までご連絡下さい。

お客様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

## 記

### 1. 本件に関する問合せ窓口

コールセンター : 0120-557-998（フリーダイヤル）

受付時間 : 月～金 9:00～17:00

（土日・祝日および指定休日は除く）

※電話番号はお掛け間違いのないようお願い致します。

### 2. 対象製品名及び医療用具承認番号

対象製品名	医療用具 承認番号	
	シングル または セミダブル	ダブル
寝生活	06B第0675号	06B第0676号
	06B第0677号	06B第0678号
	07B第0592号	-
寝生活N	20900BZZ00336000	20900BZZ00337000
寝生活MKⅢ	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
	20800BZZ00699000	20800BZZ00700000
寝生活MKⅣ	20900BZZ00336000	20900BZZ00337000
寝生活AQ	21000BZZ00417000	21000BZZ00418000
寝生活AQE	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
寝生活AQE 備長炭	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
寝生活AQL	21400BZZ00437000	21400BZZ00438000
さわやかヘルシーDX	06B第0202号	06B第0203号
さわやかヘルシーAQE	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
さわやかヘルシーAQE DX	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
暖楽AQE	20800BZZ00739000	20800BZZ00688000
暖楽AQL	21400BZZ00437000	21400BZZ00438000
新時代AQL	21400BZZ00437000	21400BZZ00438000
マイルドヘルス	06B第0677号	06B第0678号

### 3. 対象製品のご確認方法

製品名と医療用具承認番号をご確認下さい。

※下記の写真は寝生活AQEの例です。他の製品も同じ箇所に製品名と医療用具承認番号の記載があります。



### 4. 警告表示



異常時の処置	設置・保管時のご注意
<p>異常に熱い、変な臭いがするときなどは、直ちに電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜く！</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ショートや発熱により、火災や感電につながります。</li><li>●販売店にご相談下さい。</li></ul> <p>感電注意</p> <p>電源プラグを抜く</p>	<p>やわらかいふとん等の上で使用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●やわらかいふとんの上で使用すると、治療導子がしわになり、過熱して故障の原因となります。</li></ul> <p>やわらかいものの上で使用禁止</p> <p>治療導子</p> <p>やわらかいふとん</p>
設置・保管時のご注意	設置・保管時のご注意
<p>平らな所以外で使用しないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●部分的に過熱して故障の原因となり、やけどをおこすことがあります。</li></ul> <p>凹凸使用禁止</p>	<p>曲げたり折りたたんだままで使用しない！</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●温熱治療の場合、本体の局部に布団を積み重ねたり、保温性の良いものを長時間置かないでください。局部ごもり温度で本体が変色することがあります。さらに、このような誤使用を続けると、本体の安全装置が働いて発熱なくなりますのでご注意ください。</li><li>●ショートや発熱により、火災や感電につながります。</li></ul> <p>禁止</p>

#### 5. お客様の個人情報について

本注意喚起に関連し、弊社グループではコールセンター等を通じてお客様の氏名・住所・電話番号などの個人情報を収集し、利用することがあります。当該収集、利用は、当該製品に関するご連絡などの目的で行います。

以上

[その他の注意事項についてはこちらをご覧ください。](#)